

RADIESSE™ Lifting Filler

Täyteaine kohotukseen ja
piirteiden silottamiseen



RADIESSE®
The Lifting Filler

TÄYTELÄISYYTTÄ. KOLLAGEENIA. RAIKKAUTTA.

Terveen, nuoren ihon täyteläisyys, kimmoisuus ja vahvuus on kollageenin ansiota. Mitä nuoremmat kasvot ovat, sitä kiinteämpi niiden iho on ja sitä selvemmat niiden piirteet. Ikääntymisen myötä ihon luonnollinen kollageeni hajoaa ja kudosten täyteläisyys ja kimmoisuus vähenee. Kasvoihin muodostuu ryppyjä ja juonteita, iho veltostuu ja sen nuorekkuus ja raikkaus häviää, olipa ihotyyppi ja perimä mikä tahansa.

Yksittäisten rypyjen hoito ei läheskään aina riitä palauttamaan kasvojen raikkautta ja nuorekkuutta, vaan ilmeen nuorentaminen vaatii todellista täyteläisyyttä.

RADIESSE™ KOLMIVAIKUTTEINEN, KOHOTTAVA HOITO

Ruiskutettavan RADIESSE™ -hoidon kalsium-mikropartikkelit ja geeli **kohottavat piirteitä heti** ja piilottavat siten ikääntymisen merkkejä. Lisäksi RADIESSE™ muodostaa ihon alle ainutlaatuisen **tukirakenteen, joka edistää elimistön omaa kollageenimuodostusta**. Prosessi jatkuu useiden kuukausien ajan, joten RADIESSE™ -hoidon välitön **vaikutus myös säilyy pitkään**. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnollisen näköiset tulokset säilyvät useimmilla potilailla yli vuoden ajan. Hoitotulokset ovat kuitenkin aina yksilöllisiä.





USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Onko Radiesse asianmukaisesti tutkittu ja hyväksytty?

Kyllä. EU:n viranomaiset myönsivät Radiesse-valmistelle myyntiluvan vuonna 2004. Valmiste on saanut CE-merkinnän, joka osoittaa, että se täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset. Myös Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi Radiesse-valmistelle myyntiluvan vuonna 2006.

Miten hoito toteutetaan?

Lääkäri kertoo sinulle saatavilla olevista hoitovaihtoehtoista, ja päätätte yhdessä, mikä hoito sopii sinulle parhaiten. Yksi hoitokerta kestää yleensä noin 30 minuuttia. Vaikutus tulee esiin välittömästi pistoksen jälkeen.

Vaikuttaako muiden lääkkeiden käyttö?

Jos käytät muita lääkkeitä, kerro niistä lääkärille ennen hoitoa. Tämä koskee myös itsehoitolääkkeitä. Lääkäri neuvoo sinua tilanteen mukaan.

Aiheuttaako hoito haittavaikutuksia?

Pistokset voivat aiheuttaa reaktioita, esimerkiksi pistoskohdan punoitusta, turvotusta, kipua, kutinaa, värimuutoksia tai aristusta. Ne häviävät yleensä itsessään 1–2 päivän kuluessa pistoksesta.

Kauanko Radiesse-hoidon vaikutus säilyy?

Tulokset vaihtelevat potilaskohtaisesti iästä, ihotyypistä, elämäntavoista, aineenvaihdunnasta ja hoidettavasta alueesta riippuen. Yleisesti ottaen hoidon vaikutus säilyy useimmilla potilailla yli vuoden ajan.

Voiko Radiesse-hoitoa käyttää yhdessä muiden valmisteiden kanssa?

Radiesse-hoitoa ei suositella, jos alueelle on pistetty aiemmin pysyvää täyteainetta. Kerro lääkärillesi, jos olet saanut tällaista hoitoa.

Tuntuuko Radiesse ihon läpi?

Aine tuntuu todennäköisesti hetken aikaa hoidon jälkeen. Ajan mittaan se sulautuu täysin kudoksiin eikä enää tunnu ihon läpi.

Mistä saan lisätietoa Radiesse-hoidosta?

Keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Lisätietoja löydät myös osoitteesta www.radiesse.fi tai www.melon.fi.





RADIESSE

Aesthetic Treatments Worldwide

TURVALLINEN HOITO

Ryppyjä silottava RADIESSE™ on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto **FDA:n hyväksymä** ihon alle laitettava täyteaine kasvojen JA käsien keskisyvien tai syvien ryppyjen ja juonteiden tasoittamiseen.

Euroopassa RADIESSE™-täyteaineelle on myönnetty **CE-merkintä** plastiikkakirurgian ja korjaavan kirurgian toimenpiteisiin.

Radiesse™ on laajasti tutkittu tuote: yli 200 kliinistä tutkimusta.

Vuoden 2004 jälkeen on käytetty yli kuusi miljoonaa RADIESSE™-pakkausta.



RADIESSE® LIDOCAINE (+)

Radiesse-hoidot ovat nyt entistä miellyttävämpiä! Radiesse-tuotesarja on saanut lidokaiinia sisältävän version RADIESSE (+) LIDOCAINE. Tuote sisältää 0.3% lidokaiinia.

RADIESSE™ - monipuolinen täyteaine



- Nasolabiaalijuonteet
- Suupielijuonteet
- Poskien alaosa
- Poskipäät
- Leukalinja
- Suupielet
- Leuka/Leukapoimu
- Kulmakarvat
- Ohimot
- Korvannipukat
- Kämmenselkä

Poskipäät




Nasolabiaalijuonteet




Nasolabiaalijuonteet



Leukalinja

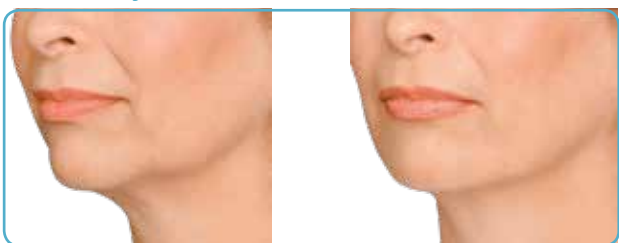

Poskien alaosa

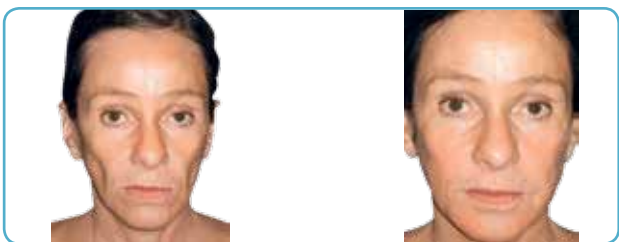

Kämmenselkä



RADIESSE®

The Lifting Filler

Maahantuoja:

Melon Oy
Hatanpään valtatie 48
33900 TAMPERE
010 423 7222

melon@melon.fi
www.melon.fi



Merz Aesthetics -logo on Merz Pharma GmbH & Co. KGaA -yhtiön tavaramerkki.
RADIESSE on Merz Aesthetics, Inc -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.



since 1908

MERZ AESTHETICS

Lisätietoja Radiessesta
www.radiesse.fi tai www.melon.fi